

Il corretto allestimento per l'esame istologico



CDV -CENTRO DIAGNOSTICO VETERINARIO
Via Oslavia 18 – 20134 Milano MI
Tel : 02 2152245 – Mail: info@cdvlab.it

Il corretto allestimento per l'esame istologico

1	Ideale utilizzare FORMALINA tamponata 10 % in quantità di 10 parti di formalina per ogni parte di tessuto
2	Sigillare perfettamente il contenitore (la formalina ed i suoi vapori sono tossici e cancerogeni!)
3	Se tutte le dimensioni del campione superano 1 cm eseguire dei piccoli tagli longitudinali per facilitare la penetrazione del fissativo
4	Evitare contenitori troppo stretti per il campione perché la porzione di tessuto a contatto con la parete del barattolo non può essere penetrata dal fissativo
5	Evitare per campioni voluminosi contenitori dal collo troppo stretto in quanto il pezzo fissato si indurisce completamente rendendone poi impossibile l'estrazione dal barattolo
6	E' possibile anche effettuare una prefissazione di 1-3 giorni e inviare quindi il campione avvolto in materiale umido dentro un sacchetto ermeticamente chiuso, il tutto inserito in un ulteriore contenitore protettivo.

Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi informazioni desideriate,
potete contattarci al tel.: 02 2152245 o Mail: info@cdvlab.it

Visitate il ns. sito : www.cdvlab.it

