

Uso corretto delle provette



CDV -CENTRO DIAGNOSTICO VETERINARIO

Via Oslavia 18 – 20134 Milano MI

Tel : 02 2152245 – Mail: info@cdvlab.it

Colore tappo	Immagine della provetta	Descrizione	Come utilizzare
ROSSO		provetta per siero con attivatore coagulazione e gel separatore	esami biochimici e ormonali (non utilizzare per monitoraggio farmaci)
VERDE		provetta con anticoagulante K3-EDTA	emocromo, esame citologico di materiali liquidi
BLU		provetta con anticoagulante litio-eparina	emocromo ed esami biochimici "rapidi" (da far pervenire in laboratorio entro le 24 ore dal prelievo)
ROSA		provetta con anticoagulante sodio citrato	esami coagulativi (rispettare proporzioni con anticoagulante in rapporto 1:9, separare il plasma entro 20' dal prelievo e mantenerlo congelato fino al momento del trasporto in laboratorio)
TRASPARENTE		provetta tipo "eppendorf" senza alcun additivo	per conservare siero e/o plasma separato
BIANCO		provetta da 10 ml senza alcun additivo, non sterile	per raccolta urine e materiali liquidi
BLU		tampone con terreno di trasporto Amies, lunghezza asta 16 cm, dimensioni puntale 4,5 mm	tamponi di varia origine (prelevare il campione possibilmente prima del trattamento antibiotico)
ARANCIONE		tampone sottile con terreno di trasporto Amies, lunghezza asta 16 cm, dimensioni puntale 2,5 mm	tamponi di varia origine (prelevare il campione possibilmente prima del trattamento antibiotico)
BLU		tampone senza terreno di trasporto	raccolta materiale per esami in PCR (inserire 0,5 ml di soluzione sterile per mantenere umidità del campione)